


Kortbruksanvisning - hCG 25 IU/L

Testkassett och urinprov skall vara rumstempererade innan testning.
Låt kassetten vara kvar i sin förpackning tills testet skall utföras.

Utförande


- Ta kassetten ur förpackningen.
- Håll pipetten lodrätt och droppa **3 fulla droppar** urin i kassetts provbrunn (S).
- Starta en tidtagare och avläs resultatet inom 3-5 minuter.

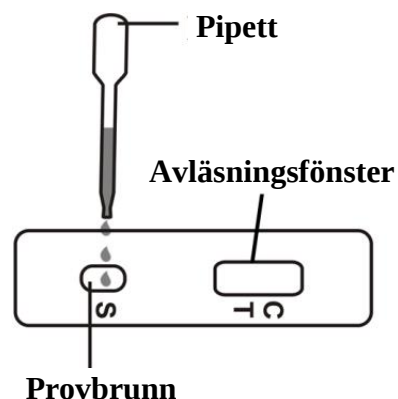

Avläsning av resultat

Avläs resultatet inom 3-5 minuter.

Avläs INTE resultatet när det gått längre tid än 5 minuter.

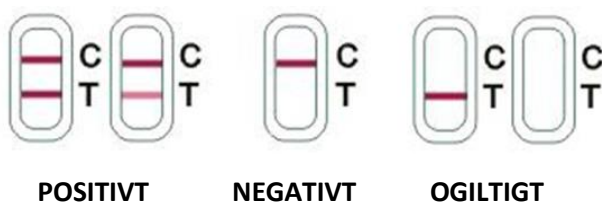

POSITIVT: Två röda linjer framträder.

En linje vid kontrollområdet (C) och ytterligare en linje vid testområdet (T).
Den röda färgens intensitet i testområdet (T) kan variera.

NEGATIVT: Endast en färgad linje framträder,

vid kontrollområdet (C). Ingen linje framträder i testområdet (T).

OGILTIGT: Ingen linje vid kontrollområdet (C),

även om en linje framträder vid testområdet (T). Upprepa testet med en ny kassett.

För ytterligare information, se bipacksedel.