

Kortbruksanvisning - hCG 25 IU/L


Teststicka och urinprov skall vara rumstempererade innan testning.
Låt stickan vara kvar i sin förpackning tills testet skall utföras.

Utförande

- Ta ur teststickan ur förpackningen.
- Håll stickan vertikalt så att pilarna pekar neråt.
- Sänk ner stickan i urinen i 10 sekunder.

Undvik att sänka ner stickan förbi MAX-linjen (se fig.)


- Placera stickan på en torr, ren och icke absorberande yta
- Avläs resultatet inom 3-5 minuter.

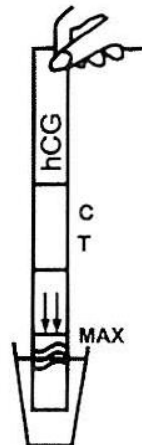

Avläsning av resultat

Avläs resultatet inom 3-5 minuter.

Avläs INTE resultatet när det gått längre tid än 5 minuter.

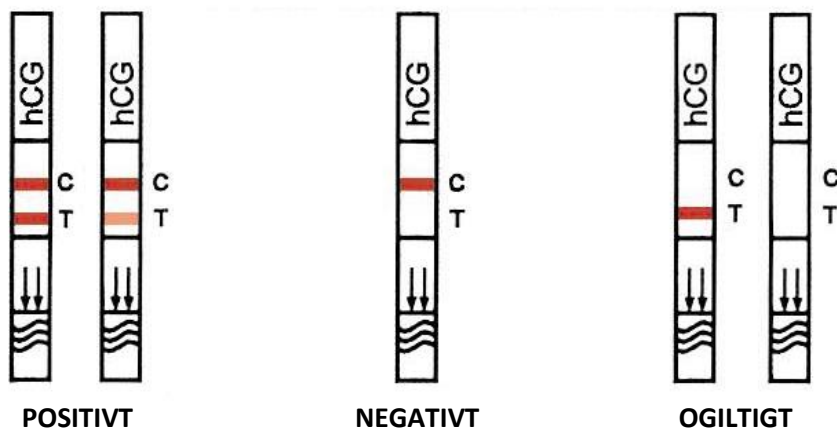

POSITIVT: Två röda linjer framträder.

En linje vid kontrollområdet (C) och ytterligare en linje vid testområdet (T).
Den röda färgens intensitet i testområdet (T) kan variera.

NEGATIVT: Endast en färgad linje framträder,

vid kontrollområdet (C). Ingen linje framträder i testområdet (T).

OGILTIGT: Ingen linje vid kontrollområdet (C),

även om en linje framträder vid testområdet (T). Upprepa testet med en ny teststicka.